

Forcare® Wash support

おもてなしの心で“洗う”をデザイン

— 頭・手・足洗浄器 —

医療・介護施設で、在宅看護・介護での衛生的な環境をサポート！
四肢洗浄でいつも“キレイ・・・心地よい生活”をご提案！

医療

介護
福祉

口腔
ケア

在宅
ケア

美容
理容

災害



大分県：医療関連産業研究開発 / 地域資源活性化支援開発

《ヘルスケア製品》 特許・意匠出願中

フォーケア® ウォッシュサポート

BL-WSH01 / 室内向け
(ホワイト・シルバー)

BL-WSB02 / 訪問向け
(ブルー・ブラック)

《フォーケア® ウォッシュサポート 誕生！》

高齢者や身体の不自由な方への負担や不便な思いをさせないサービス！
洗髪や四肢洗浄による「快適で衛生的」「さわやかな心地」をご提案！
訪問サービスと福祉機器・ものづくりで培ったノウハウを結集し、おもてなしの心で“洗う”をデザインした本洗浄器は、看護・介護をする方、される方、双方の負担を軽減し衛生的で快適な生活をお届けします。

- 当社製品「フォーケア多機能いす」との組み合わせで、さらに快適で安全にご使用いただけます。
- ディスポー洗浄袋 (本製品専用：別売) をご使用いただくことで衛生的なフットケアや足浴の提供ができます。



＜フォーケア多機能いす・昇降式 / 自在チェアとの組み合わせ：例＞



＜フットケア・施術：専用洗浄袋を使用：例＞
特許・意匠申請中



業務の省力化・腰痛防止と快適性の向上を図る

患者、入所者、在宅療養者・・・と、提供者の使用を想定した機能



利用シーンに合わせて自由に高さ調節

洗浄ボウルの高さは、昇降機構により各種ベッドや椅子の高さにあわせて無段階で調節（昇降幅 39 cm）できます。また、患者・利用者の体勢や看護師・介護士・理美容師の身長差にあわせた調節で腰痛防止効果を高めます。

※昇降は、室内向け 48 cm～87 cm、訪問向け 53 cm～92 cm できます。（洗浄ボウルを水平にした最上部の採寸です。）

※フットケアなど低いポジションでの施術提供時には、作業効率と腰痛防止効果を高める「フォーケア自在チェア」に座っての提供をお奨めします。



フォーケア自在チェア→



しっかり・やさしくフィット

より快適にフットケア・ハンドケア・シャンプーを受けていただくために、洗浄ボウルの確度（前方10°/後方8°）を自在に設定でき、脚部・頸部圧迫によるストレスを解消します。ご利用者の身体の設置部位にしっかり・やさしくフィットすることで安定した施術ができます。

※洗髪時は椅子やベッドと洗浄器の高さを確認設置。頸部への負担を軽減するために首ふり機構で微調整をしてください。



より快適に、より安全に配慮

独自開発の洗浄ボウル形状（3方向からの洗い口）と首ふり機構により、洗浄ボウルが最適な角度で患者・利用者に「やさしくフィット」。洗髪時には頭部を支える付属の頭・手・足置き台で「しっかりホールド」。頸部圧迫の予防と使用者の腰痛を予防します。

※フットケア施術用として「フットケア専用かかと置きボール」（別売）をご用意しております。お問い合わせください。



BL-WSH01

BL-WSB02


フットケア・・・洗髪・・・主たる用途に応じて洗浄器を選択

使用シーンや目的、業態に応じて2タイプからお選びください！

- 施設内の移動が中心・フットケアが主体「シャワースystem/シャワー & ストレート」型式：BL-WSH01
- 屋内外の移動を伴う・シャンプーが主体「シャワースystem/ストッパー付シャワー」型式：BL-WSB02

※シャワースystemは洗浄器に設定されていますので同時にご確認ください。

寸法表：BL-WSH01・室内向け ※BL-WSB02・訪問向け寸法は下記キャスター高に 50 mmを加算して下さい。

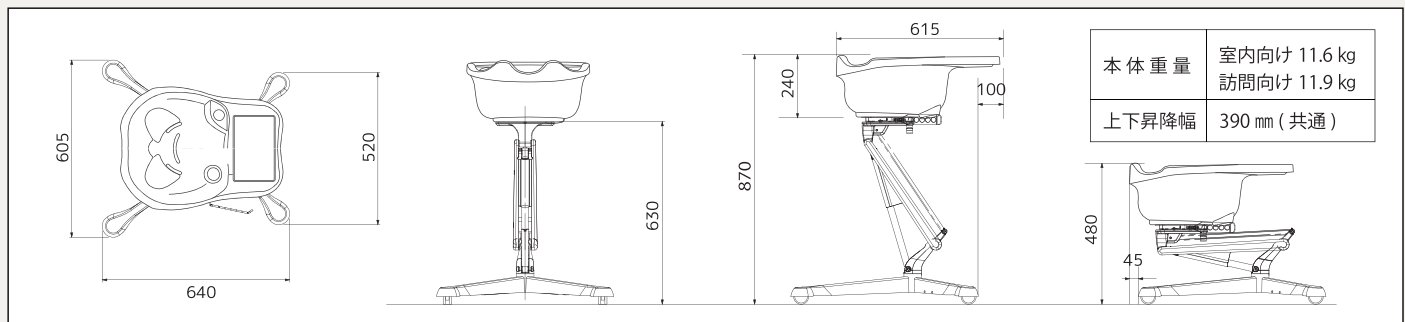

⚠ 安全にお使いいただくために

※ご購入の前に、設置条件及び使用場所・用途をご確認下さい。 ※ご使用前に、取扱説明書および操作ガイドをよくご覧の上で正しく使用ください。

※製品の写実は印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。 ※製品の仕様・デザインは予告なく、変更される場合がありますのでご了承下さい。

※製品は屋内用です。 ※本製品は、医療機器では在りません。 ※ビューティフルライフ フォーケアは有限会社ビューティフルライフの登録商標です。

お問い合わせ先：販売元



有限会社ビューティフルライフ

〒870-0829 大分県大分市権迫4組の2

e-Mail：info@be-life.info

TEL:097-546-0666

Web：http://www.be-life.info